



Máquina vaciadora de bolsas de orina h1029_01

Máquina manual para cortar, vaciar e higienizar bolsas y bolsas de orina. Dimensiones: 40 x 42 x h. 125 cm.

La máquina vaciadora de bolsas de orina h1029_01 es un dispositivo profesional manual, diseñado para su uso en hospitales, clínicas y centros sanitarios. Ideal para entornos muy restringidos, como inodoros, se puede instalar directamente encima del inodoro, utilizando la salida directa para optimizar el espacio. Es una solución compacta y de alto rendimiento para la manipulación segura de bolsas desechables que contienen líquidos orgánicos (orina, fluidos de diálisis) y mangas de aspirador quirúrgico.

h1029_01 está diseñada para cortar, vaciar e higienizar internamente bolsas de forma rápida y eficaz: en aproximadamente 10 segundos para bolsas de orina y diálisis, y 20 segundos para bolsas de revestimiento. El corte se realiza mediante un mecanismo patentado que realiza dos cortes verticales de aproximadamente 5 cm en la base de la bolsa, mientras que dos boquillas internas realizan simultáneamente el lavado interno. Al final del tratamiento, la bolsa se extrae automáticamente a través del tubo de drenaje y se descarga en el recipiente de recogida.

La máquina está fabricada en acero inoxidable AISI 316, un material altamente resistente a la corrosión perfecto para el entorno hospitalario donde se requiere la máxima higiene y durabilidad. No requiere conexión eléctrica: funciona exclusivamente con la red de agua y alcantarillado, garantizando un funcionamiento continuo incluso en ausencia de corriente eléctrica y costes energéticos cero.

Al final de cada turno, el operador puede activar un sistema de limpieza de la cámara de corte integrado, mediante pastillas higienizantes biológicas protegidas por un film microperforado. h1029_01 cumple la normativa vigente, como el D.Lgs 81/2008

Y la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, y está protegido por patente italiana.

El modelo H1029_01 destaca por su ausencia de consumo eléctrico, su robusta construcción en acero inoxidable AISI 316 y su capacidad para instalarse en espacios extremadamente reducidos, incluso encima de un inodoro.

El modelo H1029_01 destaca por su ausencia de consumo eléctrico, su robusta construcción en acero inoxidable AISI 316 y su capacidad para instalarse en espacios extremadamente reducidos, incluso encima de un inodoro.

Características técnicas:

Funcionamiento: manual, sin electricidad

Material: acero inoxidable AISI 316

Dimensiones: 40 x 42 x H 125 cm

Peso: 50 kg

Instalación: encima del WC, con desagüe directo

Conexiones necesarias: red de agua y alcantarillado

Tipo de corte: Corte vertical doble de 5 cm (patentado)

Si dirige una sala de hospital, una clínica ambulatoria o un centro de diálisis, elegir una máquina para vaciar e higienizar bolsas de orina es esencial para garantizar seguridad, eficiencia operativa e higiene.

Lavado interior: a través de 2 boquillas

Tiempo de ciclo: 10 seg (bolsas de orina/diálisis) 20 seg (pezoneras)

El modelo H1029_01 destaca por su ausencia de consumo eléctrico, su robusta construcción en acero inoxidable AISI 316 y su capacidad para instalarse en espacios extremadamente reducidos, incluso encima de un inodoro.

Sistema de higienización interior: con pastillas activadoras biológicas

Limpieza de la cámara de corte: al final del turno, sistema integrado

Es ideal cuando se necesita operar en entornos sin tomas eléctricas o con acceso limitado.

Cumplimiento: D.Decreto Legislativo 81/2008, Directiva 2006/42/CE

La compatibilidad con pezoneras y bolsas de diálisis, unida a la facilidad de uso y mantenimiento, lo convierten en una de las soluciones más completas del mercado.

Compruebe siempre la conformidad con la normativa, la facilidad de instalación y las características estándar, que el H1029_01 satisface plenamente.

Beneficios para el usuario:

- Ahorro: total de energía sin necesidad de electricidad.
- Máxima higiene: lavado interno e higienización con pastillas biológicas.
- Optimización del espacio: Instalable encima del inodoro.
- Ciclo de funcionamiento rápido: 10 a 20 segundos por bolsa.
- Facilidad de uso: Uso y mantenimiento diario.

*Imágenes con fines puramente ilustrativos.

Preguntas frecuentes:

INFORMACIÓN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM